

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Belivair®

NEZ BOUCHÉ
Eau de mer HYPERTONIQUE

Spray nasal 125ml e
Dispositif médical de classe II a



POURQUOI AVOIR UNE BONNE HYGIÈNE NASALE EN CAS DE NEZ BOUCHÉ ?

Directement au contact de l'environnement, la muqueuse nasale constitue la première barrière de protection du système respiratoire contre les agressions extérieures (*fumée, froid, pollution, virus...*) en filtrant l'air inspiré.

Le nez a donc une fonction de régulation indispensable pour l'équilibre du système respiratoire.

Le lavage nasal à l'eau de mer hypertonique permet de décongestionner le nez et d'améliorer son fonctionnement physiologique.

En cas de rhume, rhinite ou sinusite, la fonction de régulation du nez bouché ou un nez qui coule, empêchant ainsi le bon fonctionnement respiratoire.

Un lavage nasal à l'eau de mer hypertonique permet donc de :

- Déboucher le nez et restaurer la respiration nasale.
- Favoriser l'évacuation du mucus.
- Faciliter l'élimination des particules inhalées.

QUELLES SONT LES PROPRIÉTÉS DE BELIVAIR NEZ BOUCHÉ ?

Belivair NEZ BOUCHÉ est adapté **en cas de rhume, rhinite ou sinusite chez les adultes et des enfants à partir de 3 mois.**

Belivair NEZ BOUCHÉ est un **spray nasal 100% naturel, contenant une solution d'eau de mer hypertonique enrichie en extraits aqueux d'aloë vera et de camomille.** Grâce à son hypertonie et son association d'extraits naturels, Belivair NEZ BOUCHÉ :

- Décongestionne les fosses nasales par action osmotique naturelle.
- Diminue la viscosité des sécrétions nasales et facilite leur élimination.
- Apaise et hydrate la muqueuse irritée grâce à l'action des extraits d'aloë vera et de camomille*.
- Participe à la protection contre les infections par l'élimination du mucus.

** Reconnus respectivement pour leurs propriétés hydratantes et apaisantes.*

QUAND UTILISER BELIVAIR NEZ BOUCHÉ ?

Usage occasionnel chez l'enfant de 3 mois à 6 ans.

Dès les premiers symptômes du rhume, de la rhinite ou de la sinusite : 1 à 2 pulvérisations sans chaque narine. Renouveler les pulvérisations aussi souvent que nécessaire pour bien dégager le nez et éliminer l'excès de mucosités, dans la limite de 6* pulvérisations par jour et par narine.

L'utilisation est possible durant la grossesse et l'allaitement.

Si vous utilisez un autre produit local pour un rhume ou une rhinite allergique en association avec Belivair NEZ BOUCHÉ, il est recommandé d'utiliser Belivair NEZ BOUCHÉ avant l'autre produit nasal, en raison de ses propriétés nettoyantes.

* 3 pour l'enfant de 3 mois à 6 ans.

COMMENT UTILISER BELIVAIR NEZ BOUCHÉ ?

1. Se moucher avant et après utilisation.
 2. Incliner la tête sur le côté et introduire l'embout délicatement dans la narine opposée. Pour les enfants de moins de 6 ans, les allonger sur le dos au préalable.
 3. Exercer une pression franche et brève.
 4. Laisser le produit agir quelques secondes puis essuyer et moucher délicatement.
 5. Répéter l'opération dans l'autre narine.
 6. Renouveler jusqu'à dégagement complet des fosses nasales.
 7. Laver soigneusement l'embout sous l'eau chaude après chaque utilisation et le laisser sécher à l'air libre.
 8. Reboucher le spray nasal à l'aide du capuchon.
- Il est préférable d'utiliser un seul spray nasal par personne.

QUE CONTIENT BELIVAIR NEZ BOUCHÉ ?

Solution hypertonique. Eau de mer naturelle, eau purifiée, extraits aqueux d'aloë vera et de camomille.

Eau purifiée.

Produit 100% naturel - Sans conservateur.

Gaz propulseur : air comprimé.

Il n'est pas en contact avec la solution.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

En cas de muqueuse irritée, des sensations douloureuses, des picotements ou des saignements de nez peuvent survenir au cours de l'utilisation. Dans ce cas là, essayez le nez, stoppez l'utilisation du produit et consultez un médecin, si nécessaire.

L'embout physiologique avec sa collerette de sécurité permet une utilisation chez l'enfant à partir de 3 mois.

En cas de questions ou si les symptômes persistent, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

Belivair NEZ BOUCHÉ est un spray nasal sous pression qui peut être utilisé en toute sécurité dans toutes les positions.

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ?

Tenir le produit hors de la portée et la vue des enfants.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité ou d'allergie à un ou plusieurs composants.

Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Spray nasal sous pression : ne pas percer, ni brûler même après utilisation.

Tenir à l'écart des rayons directs du soleil.

Ne pas exposer à une température de plus de 50°C.

Stocker à température ambiante.

Dernière révision : 2017-07

Marquage CE : 2014



FABRICANT :

LABORATOIRES CHEMINEAU
93 ROUTE DE MONNAIE
37210 VOUVRAY - FRANCE

DISTRIBUTEUR :

THERABEL LUCIEN PHARMA
19 RUE ALPHONSE DE NEUVILLE
75017 PARIS - FRANCE



AN1313 0005

THERABEL